Vantage Plus

Instruções








# Introdução

Agradecemos a sua compra do Oftalmoscópio Indirecto Keeler Vantage Plus.

Concebemos, desenvolvemos e fabricámos este produto com o maior cuidado, para garantir que ele lhe irá proporcionar muitos anos de serviço sem problemas. Contudo, é importante que leia as descrições e instruções de instalação e funcionamento cuidadosamente antes de instalar ou utilizar o seu novo oftalmoscópio indirecto.

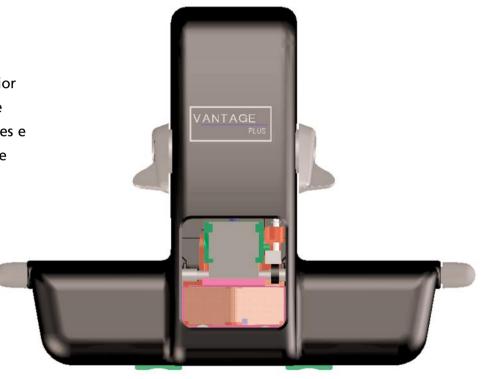







# Índice

- 1. Símbolos
- 2. Avisos e Precauções
- 3. Montagem e Utilização do Oftalmoscópio Vantage Plus
- 4. Acessórios
- Substituição da Lâmpada
- 6. Fontes de Alimentação
  - a. Sem Fios
  - b. SmartPack e WallPack
- 7. Garantia e Manutenção
- Instruções de Limpeza
- 9. Informação Técnica
- 10. Informação para Contacto



Clique no índice para ir directamente para a secção que seleccionou ou navegue utilizando os botões "Seguinte" e "Anterior" do lado direito. Ao clicar em "Página Inicial" volta a esta página.







# **Símbolos**



Leia as instruções do utilizador relativas a avisos e precauções e a informação adicional.



O selo da CE deste produto indica que foi testado e que está em conformidade com as disposições da Directiva sobre Dispositivos Médicos 93/42/CEE.



Isolamento duplo.



Tipo B: Protecção contra choques eléctricos.



# Avisos e Precauções



#### Aviso

- Não utilizar o produto se estiver danificado. Inspeccionar visual e periodicamente para detectar sinais de danos.
- Não utilizar na presença de gases inflamáveis.
- Não mergulhar este produto em fluidos.
- Não ligar o adaptador da rede a uma tomada danificada.
- Posicionar o cabo de corrente de maneira a eliminar o risco de o utilizador poder tropeçar nele e magoar-se.
- Este dispositivo não possui nenhumas peças cuja manutenção possa ser feita pelo utilizador. Contacte o representante de manutenção autorizado para mais informações.
- Não retirar a lâmpada enquanto esta estiver quente.
- Não desmontar nem modificar a pilha. Esta não contém peças para manutenção.
- Não deve descartar-se das pilhas queimando-as, furando-as ou sujeitando-as a curto-circuito.
- Não utilizar uma pilha deformada, com fugas, corroída ou com danos detectáveis à vista. Manusear com muito cuidado a pilha se estiver danificada ou com fugas. Se tocar no

electrólito, lavar a área exposta com água e sabão. Se o electrólito entrar em contacto com os olhos, consultar imediatamente o médico.



#### Precaução


- O produto foi concebido de modo a funcionar com segurança a uma temperatura ambiente entre +10°C e +35°C.
- Utilizar apenas a fonte de alimentação Keeler.
- Descartar-se da pilha em conformidade com os regulamentos locais sobre reciclagem de pilhas.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Para evitar a formação de condensação, deixar o instrumento atingir a temperatura ambiente antes de o utilizar.
- Para substituir a pilha de lítio, desligar o oftalmoscópio indirecto e introduzir a pilha nova.







# Montagem e Utilização do Oftalmoscópio Vantage Plus

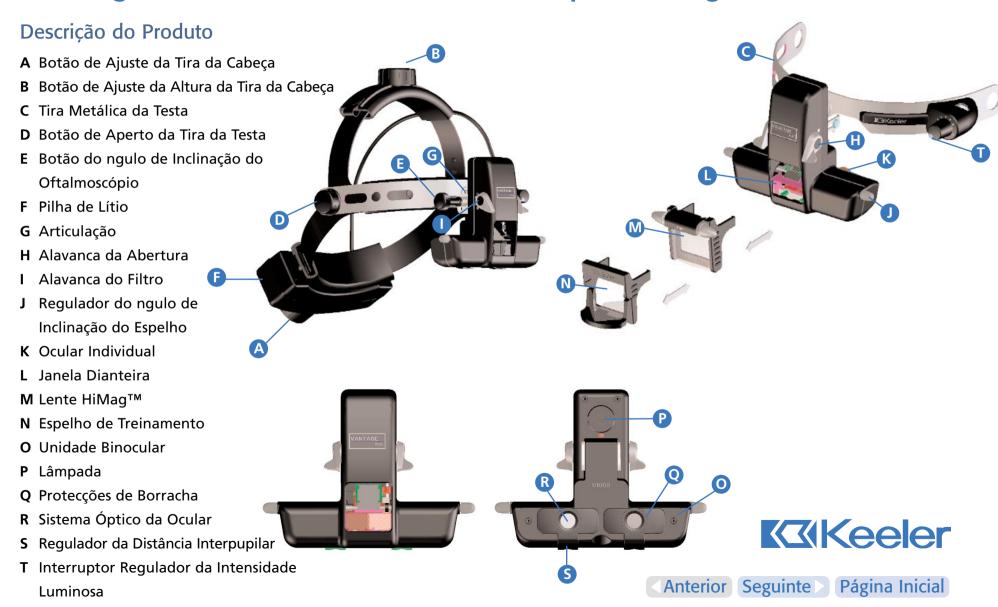

#### Ajuste da Tira da Cabeça


#### **Ajuste Confortável**


Ajuste o tamanho (A) fig. 1 e a altura (B) fig. 2 de modo que o instrumento fique suportado confortavelmente em redor e no topo da cabeça.


#### Alinhamento do ngulo de Inclinação do Oftalmoscópio


Para o alinhamento vertical das oculares e da unidade binocular (O) ajuste a altura da barra metálica da testa (C), se necessário, utilizando os botões de aperto da tira da testa (D) situados de cada lado do capacete (fig. 3).

Posicione a unidade binocular (O) o mais junto possível dos olhos ou óculos para conseguir um campo de visão máximo. Desaperte levemente o botão do ângulo de inclinação do oftalmoscópio (E) para poder ajustar aquele e aperte assim que estiver em posição, como se indica na (fig. 4).

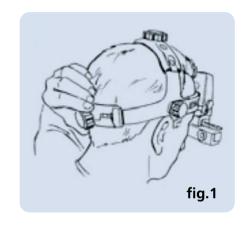

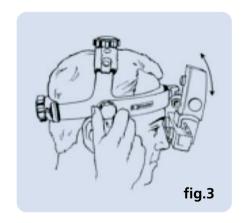

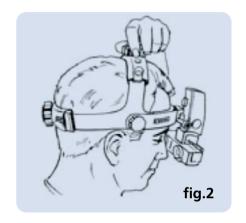

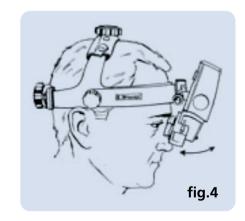









#### Regulador de Ajuste da Distância Interpupilar (S)

Uma vez que a distância entre os olhos varia com o utilizador, é necessário ter cuidado para assegurar que o sistema óptico (oculares) está ajustado adequadamente em frente de cada olho.

Para tal, ajuste sempre o selector da abertura (H) no feixe de luz grande.

Coloque um objecto, por exemplo o polegar, a aproximadamente 40 cm do rosto e centralize-o horizontalmente dentro do feixe de luz. Em seguida feche um dos olhos. Com o polegar e o indicador da outra mão deslize o regulador da distância interpupilar (S) do olho aberto (situado imediatamente abaixo de cada ocular) de modo que o seu objecto se desloque para o centro do campo, mantendo o objecto no centro do feixe de luz. Repita a operação para o outro olho.

#### Obtenção de Imagem Fundida

Verifique que obtém uma única imagem fundida do seguinte modo:



#### Regulador do ngulo de Inclinação do Espelho (J)

A luz é posicionada verticalmente dentro da área que corresponde aos dois terços superiores do campo de visão rodando o eixo (J) localizado de cada lado da unidade binocular.

### Interruptor Regulador da Intensidade Luminosa (T)

Para acender a lâmpada, rode o interruptor regulador da intensidade luminosa (T) para a esquerda.





Ajuste da Abertura

Alavanca de Selecção da Abertura (H)

Rodando H pode seleccionar várias aberturas.

O oftalmoscópio Keeler Vantage Plus possui 3 aberturas de luz que oferecem máxima estereopsia.

Ouando se selecciona a abertura, a iluminação e os espelhos de visualização são automaticamente Os espelhos ajustados na movem-se para a frente ou para trás à estereopsia máxima. medida que se seleccionam as aberturas Abertura Grande

Feixe grande, redondo e homogéneo é adequado para exames de rotina efectuados com pupilas totalmente dilatadas. Nesta posição o espelho permanece na posição para a frente e o sistema óptico é divergente.

#### ○ Abertura Intermédia

Feixe de luz intermédio foi concebido para diminuir a reflexão quando se examina uma pupila insuficientemente ou parcialmente dilatada (3 mm). Também é ideal para uma inspecção mais detalhada de áreas específicas do fundo do olho. O espelho e o sistema óptico permanecem na posição intermédia.

#### O Abertura Pequena

Este feixe de luz é ideal para pupilas pequenas, não dilatadas. O espelho desloca-se para trás e o sistema óptico converge automaticamente.

Selecção da Abertura Grande/Intermédia/Pequena

> Ajuste do ngulo de Iluminação









#### Alavanca de Selecção do Filtro (I)





#### Círculo Azul

Filtro azul de cobalto para angioscopia fluoresceínica.

#### Círculo Branco

Luz branca – seleccione a luz branca sem filtro quando inspeccionar uma patologia específica e for necessário uma luz mais brilhante e mais branca.



#### Círculo Verde

Filtro isento de vermelho – este filtro reduz a luz vermelha e, portanto, o sangue parece negro, destacando-se o seu perfil contra um fundo escuro.



#### Difusor

Este feixe exclusivo de luz difusa de largura extra permite a utilização de uma técnica mais fácil para exames do fundo do olho mais difíceis. Os que se iniciam nesta técnica também podem achar esta abertura particularmente útil, porque o alinhamento necessário entre o capacete, a lente convergente e a pupila para conseguir a imagem óptica total não é tão crítico como o alinhamento com o feixe convencional.



### Acessórios

# Instalação da Lente HiMag™ (M) e do Espelho de Treinamento (N)

Para instalar a lente HiMag™ basta posicioná-la em frente da janela, como se indica no diagrama.




#### Protecções de Borracha

As protecções de borracha são fornecidas para proteger os óculos e são fabricadas de borracha para evitar atrito. Para usar as protecções, coloque-as sobre as oculares.

#### **Lentes Planas**

O oftalmoscópio Keeler Vantage Plus vem fornecido de fábrica com duas lentes de +2 dioptrias. Se preferir, existem disponíveis lentes planas que podem ser instaladas como se indica na fig. 5.

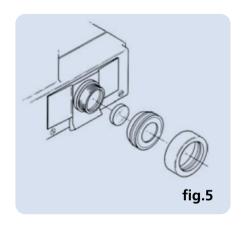

### Depressores da Esclerótica

Existem disponíveis depressores da esclerótica para visualização da ora serrata.








# Substituição da Lâmpada

Atenção: A lâmpada pode aquecer muito com o uso prolongado.

Deixe a lâmpada arrefecer e desligue o instrumento da fonte de electricidade. Retire a lâmpada da parte posterior do instrumento e introduza nova lâmpada, certificando-se de que a chaveta da lâmpada fica alinhada com a abertura e introduzida com segurança.

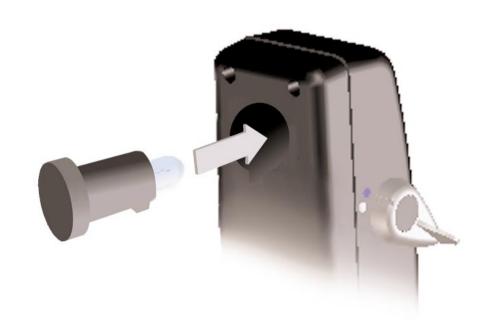



### Introdução/substituição da Pilha

1. Solte a pilha premindo o botão de desbloqueio e retire a pilha do seu suporte.

2. Para introduzir uma pilha nova, coloque-a no seu suporte até ficar completamente encaixada.













Página Inicial

### Carga da Pilha

1. Substitua a placa de fecho pelo adaptador da rede apropriado e ligue a ficha do cabo à tomada de alimentação do carregador.



Retire a placa de fecho

#### Porta-Pilhas da Tira da Cabeça

LED intermitente – A pilha necessita de carga.

#### Carregador


**LED apagado** – Pilha totalmente carregada.

**LED** intermitente – A completar a carga.

**LED aceso** – A carregar rapidamente.

A pilha pode ser usada em qualquer altura durante o ciclo de carga e volta a carregar automaticamente quando for colocada no carregador.

A seta no carregador indica que pilha está a ser carregada.

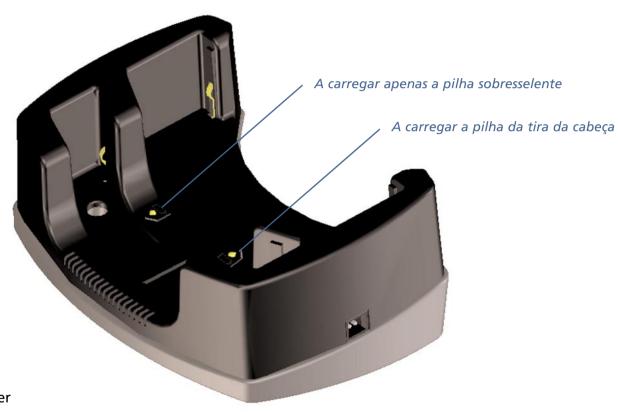








### Ciclo de Carga da Pilha


A pilha do oftalmoscópio indirecto demora aproximadamente 2 horas a carregar completamente.

A pilha dura aproximadamente 2 hora à potência máxima.

A pilha sobresselente demora 4 horas a carregar.

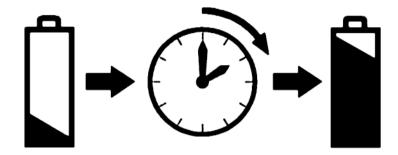



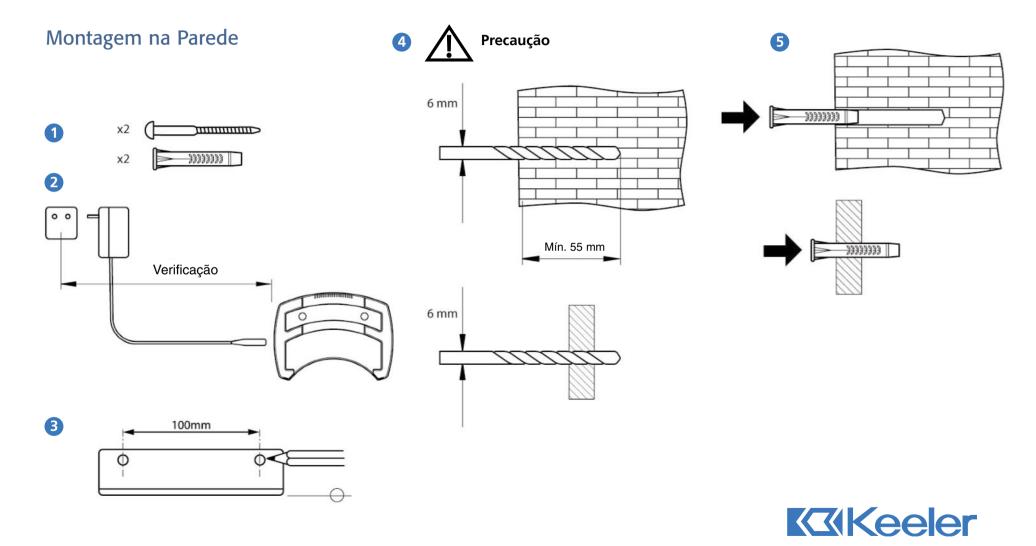


Anterior Seguinte

Página Inicial

### Lista de Peças

- A Chave sextavada
- **B** Parafusos
- **C** Parafusos
- **D** Buchas
- E Placa base
- F Montagem na parede
- **G** Discos adesivos
- H Pilha recarregável Peça nº EP39 22079
- I Corpo
- J Fonte de alimentação
- K Ficha australiana
- L Ficha do Reino Unido
- M Ficha europeia
- N Ficha dos EUA

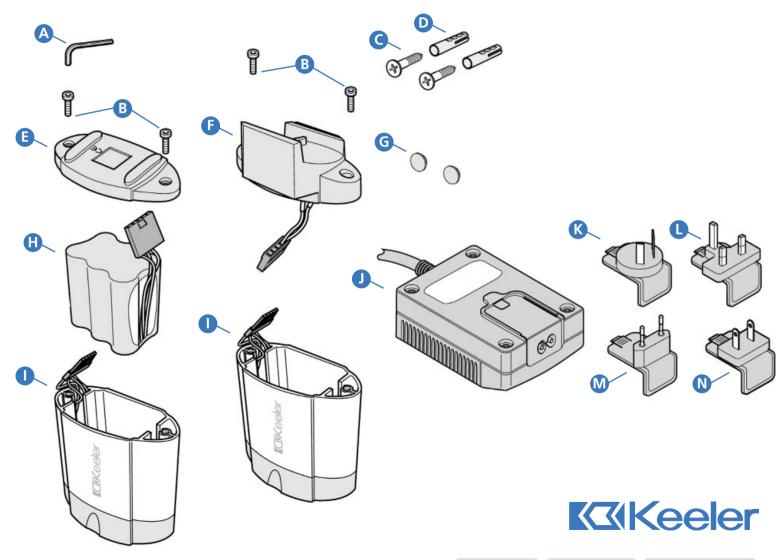






Página Inicial


### Preparação da Ficha

Substitua a placa de fecho pelo adaptador da rede apropriado, se necessário, ou use o conector IEC 60320 TIPO 7 (não fornecido).

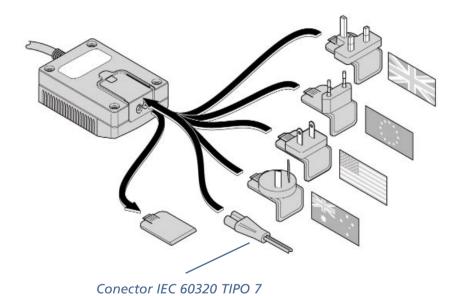

#### Conversão

Para converter num sistema WallPack ou SmartPack siga as ilustrações abaixo.

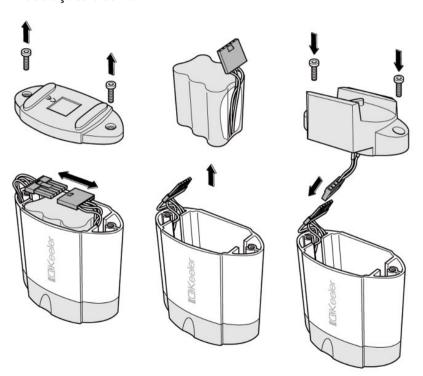










### Fixação do Dispositivo de Montagem na Parede


Use as buchas e parafusos para montar a unidade na parede e fixe os discos adesivos nos lados da caixa.

### Ligação






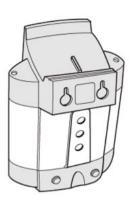

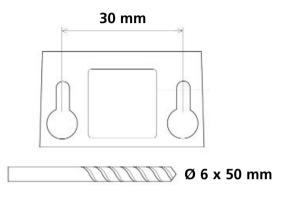


#### Tempo de Carga

Carregue a pilha durante 12 a 14 horas antes da sua utilização inicial. Nota: O aquecimento da unidade durante a carga é normal.

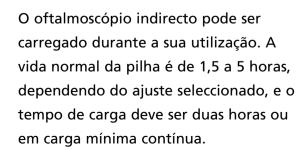



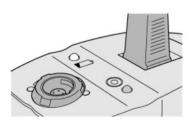









#### Visores de LED



Impulso lento




Impulso rápido




LED aceso



LED apagado

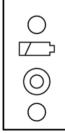


Carga da pilha

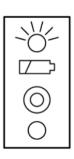

Carga mínima contínua



Em utilização

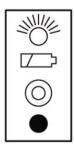


Pilha descarregada

#### Alimentação por Pilha

Introduza ou retire a ficha do oftalmoscópio ou ligue/desligue o oftalmoscópio.

#### Alimentação pela Rede

- LIGUE/DESLIGUE o oftalmoscópio indirecto
- Introduza ou retire a ficha de rede
- Lique ou deslique o interruptor do suporte da pilha
- Quando o oftalmoscópio indirecto estiver ligado acende a luz verde do LED

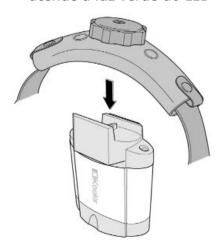









# Garantia e Manutenção

Não existem peças que possam ser reparadas pelo utilizador – toda a manutenção e reparação preventiva deve ser realizada exclusivamente por representantes autorizados da Keeler.

O seu produto Keeler está garantido por 3 anos e a sua substituição ou reparação será efectuada gratuitamente desde que satisfaça as seguintes condições:

- As falhas são causadas por defeitos de fabrico
- A fonte de alimentação foi utilizada em conformidade com estas instruções
- A reclamação é acompanhada de prova de compra.

As pilhas têm a garantia de 1 ano a partir da data de compra.

# Limpeza

Este instrumento só deve ser limpo por métodos de limpeza manual que não envolvam a imersão do mesmo, como se descreve a seguir. Não efectuar autoclavagem, nem mergulhar em fluidos de limpeza. Desligar sempre da fonte de alimentação antes de efectuar a limpeza.

Limpar a superfície externa com um pano absorvente limpo que não liberte cotão, humedecido com uma solução de água/detergente (2% de detergente em volume) ou com uma solução de água/álcool isopropílico (70% de AIP em volume).

Verificar que não penetra no instrumento qualquer excesso de solução. É necessário cuidado para se assegurar de que o pano não fica saturado com solução.

As superfícies devem ser cuidadosamente secas com um pano limpo que não liberte cotão.

Eliminar com segurança os materiais de limpeza usados.






# Informação Técnica

Já está bem comprovado que a exposição dos olhos a fontes de luz intensas durante períodos prolongados constitui um risco de lesão fótica da retina. Muitos instrumentos oftálmicos iluminam o olho com uma luz intensa. A decisão sobre a intensidade de luz a utilizar em qualquer procedimento deve ser tomada caso a caso. Em cada caso, o médico deve avaliar o benefício associado ao risco apresentado pela intensidade de luz a ser utilizada. A utilização de luz insuficiente pode resultar em visualização inadequada e efeitos adversos mais graves do que a lesão fótica da retina. Além disto, e apesar de todos os esforços para minimizar o risco de lesão da retina, ainda é possível ocorrer alguma lesão. A lesão fótica da retina é uma complicação possível resultante da necessidade de usar uma luz brilhante para visualizar claramente a estrutura ocular durante intervenções cirúrgicas oftálmicas.

Apesar de não terem sido identificadas lesões visíveis da retina associadas a instrumentos oftálmicos, recomenda-se que os níveis de iluminação sejam definidos no valor mínimo necessário para realizar o diagnóstico. O risco pode ser maior para crianças jovens e pessoas com doenças oculares. O risco também pode aumentar se a pessoa a ser examinada tiver sido submetida, nas

24 horas precedentes, a qualquer exposição ao mesmo instrumento ou a qualquer outro instrumento oftálmico que use uma fonte de luz visível. Isto aplica-se particularmente se o olho tiver sido exposto a fotografia retiniana.

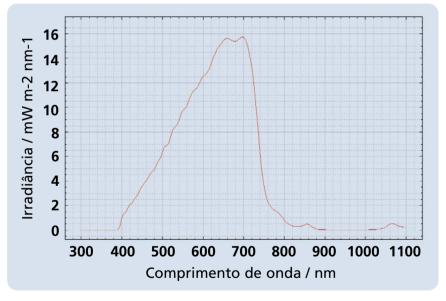

Irradiância espectral do oftalmoscópio indirecto Vantage Plus no plano do utilizador.





# Informação Técnica

Radiância da fonte fotoquímica	Abertura de 1 mm (mW cm <sup>-2</sup> sr <sup>-1</sup> )
Afáquico, L <sub>A</sub> (305-700nm)	1,32
Fáquico, L <sub>B</sub> (380-700nm)	1,16

Radiância calculada das fontes fotoquímicas

Temperatura operacional: +10°C a +35°C

Temperatura de transporte: - 40°C a +70°C; 10% a 95% HR

Dados da alimentação de rede: 100-240 V - 50/60 Hz

Fonte de alimentação nominal: 12 V, 2,5 amps

**Funcionamento:** Contínuo

Classificação: Equipamento de Classe II

Tipo B: Protecção contra choques

eléctricos

**Testado segundo as normas:** 

IEC 60601-1 Segurança Eléctrica

IEC 60601-1-2 **EMC** 

ISO 9022-2:1994 Sistemas ópticos e equipamento

óptico - Métodos de teste ambientais

Frio, calor e humidade.

ISO 9022-3:1994 Sistemas ópticos e equipamento

óptico - Tensões mecânicas.

EN ISO 15004:1997 Instrumentos oftálmicos -

Requisitos fundamentais.







# Informação para Contacto

Fabricado no R.U. por:

Keeler Limited
Clewer Hill Road
Windsor
Berkshire SL4 4AA
Inglaterra

Linha Grátis: 0800 521 251 Tel: +44 (0) 1753 857177 Fax: +44 (0) 1753 827145 Distribuído por:

Keeler Instruments Inc. 456 Parkway Broomall PA 19008, EUA

Linha Grátis: 1 800 523 5620

Tel: 610 353 4350 Fax: 610 353 7814

Como parte da nossa política de melhoria constante do produto, reservamos o direito de alterar e/ou corrigir as especificações em qualquer altura sem aviso prévio.

Patente pendente.



